

ORTESIS PULGAR RÍGIDA DE REPOSO



INMOVILIZA Y ALIVIA EL PULGAR



INDICACIONES:

Por la noche o en cualquier situación en la que no use la mano, llevar de forma regular la ortesis pasiva EPITACT® ayuda a aliviar los dolores articulares en la base del pulgar y contribuye a limitar la evolución de la rizartrosis.

CONTRAINDICACIONES:

No usar sobre una lesión cutánea.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

En caso de edema grave: vigilar la mano durante el uso. Retirar el dispositivo si el apriete es demasiado importante y molesta la circulación. En caso de duda, pedir consejo a su médico o farmacéutico. No aplicar crema ni pomada antes de la aplicación de la ortesis. No usar al lado de una llama o de un cuerpo incandescente.

ESPECIFICIDADES:

La ortesis EPITACT® inmoviliza el pulgar en posición de reposo abriendo la comisura entre el índice y el pulgar. La alineación de los huesos limita las fuerzas que se ejercen en la articulación trapeciometacarpiana y alivia el dolor.

ERGONOMÍA: Gracias a sus refuerzos, desarrollados para adaptarse perfectamente a la morfología de la mano, la ortesis de inmovilización le aporta una comodidad óptima. Ligera y ultrafina, no notará que la lleva.

CONSEJO:

Como complemento de la ortesis rígida de reposo, le recomendamos llevar la ortesis flexible de actividad EPITACT® en todas las situaciones en las que necesite usar la mano.

MANTENIMIENTO:

Lavado a mano a 30°C, con un jabón no agresivo sin detergente ni lejía. Enjuagar bien. Escurrir mediante presión. Para el secado, no exponer a una fuente de calor directo (radiador, rayos del sol). No usar quitamanchas.

COMPOSICIÓN: 57% téxtil (poliamida, elastano, poliuretano), 43% plástico termoconformable TPE

Los materiales de la ortesis se han sometido a todas las pruebas reglamentarias impuestas por la norma ISO 10 993-1, relativa a los productos que entran en contacto con la piel. Si a pesar de ello sufre alguna molestia, deje de usar el producto inmediatamente y póngase en contacto con MILLET Innovation. MILLET Innovation no asumirá ninguna responsabilidad en caso de un uso del producto no conforme a las recomendaciones del fabricante. El idioma de referencia es el francés. Marcado CE inicial: 2017.



lavable a mano.



No planchar, ni siquiera a vapor.



No lavar en seco.



No usar lejía.



No secar en secadora.



Ver embalaje.

Producto resultante de la investigación de MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Loriot/Drôme - FRANCIA



MILLET
INNOVATION

www.epitact.es